



20 x  ≈ 1 mL (мл)

FLOCARE® GRAVITY PACK & BOTTLE SET

Гравітаційний набір для харчування з пляшки та пакету Flocare®

Набір для ентерального годування через зонд /
Тільки для ентерального застосування /
Використання лише для одного пацієнта,
не використовувати більше, ніж 24 години /
Небезпека удушення; незакріплені деталі.




Нутриція Медікал Девайсез Б.В.
Таурусавеню 167, 2132 ЛС Хоофддорп, Нідерланди
Nutricia Medical Devices B.V.
Taurusavenue 167, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands

Виробничі площадки:

Нутриція Фармасьютікал Уксі Ко., Лтд., Ксінмінг Роуд № 17, Уксі Ксінву Дистрикт,
Цзянсу Провінс, 21400, Китайська Народна Республіка
Nutricia Pharmaceutical Wuxi Co., Ltd., No. 17, Xinming Road, Wuxi Xinwu District,
Jiangsu Province, 21400, P.R. China

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ з іноземними інвестиціями «Нутриція Україна»
04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14, корп 2, Україна
Тел.: 0 800 50 17 85
Веб-сайт: <https://medical.nutricia.ua>

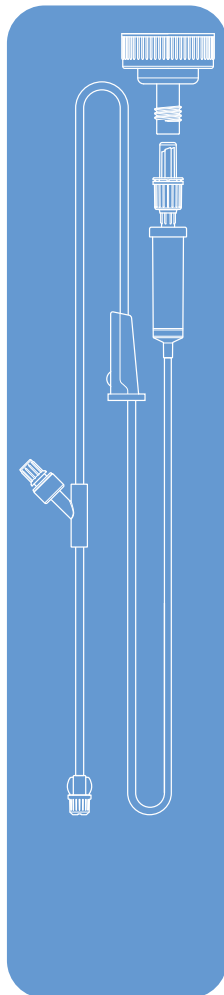

ENTERAL ONLY



CE
0344



STERILE EO



MD



8 716900 564215

REF

589755
N589755CU01UA

LOT



UA.TR.116

ГРАВІТАЦІЙНИЙ НАБІР ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ З ПЛЯШКИ ТА ПАКЕТУ FLOCARE®

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Набір для введення ентерального харчування через зонд для гравітаційного зондового харчування, призначений для введення зондового харчування пацієнтам, які переносять непростийну швидкість потоку.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Тільки для ентерального застосування; небезпека удушення з причини незакріплених частин; тільки для одного пацієнта, не використовувати довше 24 годин. Не використовувати повторно, оскільки це може створити ризик інфекції та призвести до того, що виріб не буде функціонувати належним чином. Не використовувати з насосом для ентерального харчування. Не допускається модифікація виробу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Зберігати в сухому, чистому місці. Перед використанням виробу проконсультуйтеся з лікарем.


Примітка: Про будь-який серйозний інцидент, що стався у зв'язку з використанням цього виробу, необхідно повідомити компанію «Нутриція» та місцевий компетентний орган.

Набір для введення ентерального харчування можна під'єднувати лише до ентеральних пристроїв ENFit™ (ENFit) та ємностей для ентерального харчування.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІД'ЄДНАННЯ: Закрийте роликівий затискач (1), підключіть набір для введення ентерального харчування до контейнера з харчуванням (2) і підвісьте контейнер з ентеральним харчуванням на висоті приблизно одного метра від шлунку (3). Обережно стисніть крапельницю, поки вона не заповниться на третину (4), зніміть захисний ковпачок (5), відкрийте роликівий затискач (6), як тільки набір для введення ентерального харчування буде заповнений, знову закрийте затискач (7).

ВИКОРИСТАННЯ: Підключіть набір для введення до зонду для ентерального харчування (8). Регулюйте швидкість/інтенсивність подачі, повільно відкриваючи або закриваючи роликівий затискач (9). Кожні 20 крапель дорівнюють приблизно 1 mL (мл). Регулярно перевіряйте контейнер з ентеральним харчуванням, щоб переконатися, що швидкість потоку є правильною. Завжди спостерігайте за пацієнтом під час процедури. Після використання утилізуйте виріб та упаковку відповідно до лікарняних, адміністративних та/або місцевих правил.

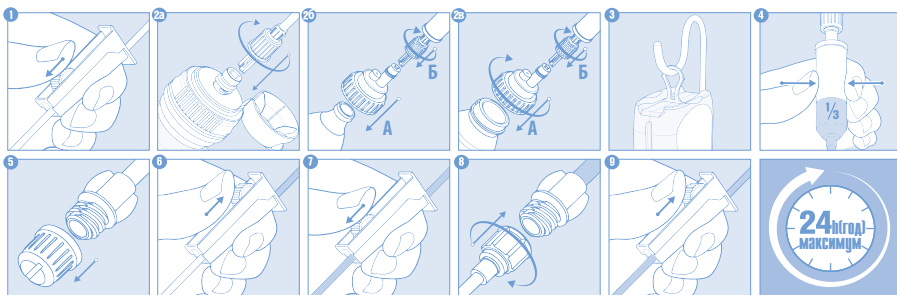

РОЗШИФРУВАННЯ СИМВОЛІВ

Символ	Значення	Символ	Значення	Символ	Значення
	Виробник		Медичний виріб		Використати до
	Стерилізація оксидом етилену		Користуйтеся інструкцією із застосування		Захищати від сонячного світла
	Не застосовувати в разі пошкодження пакування		Номер за каталогом		Зберігати в сухому місці
	Повторно не використовувати		Код партії		Тільки для ентерального застосування
	Попередження		The Green Dot (Der Grüne Punkt)		Одинарна стерильна бар'єрна система
	Маркування CE		Знак відповідності технічним регламентам України з ідентифікаційним номером органу з оцінки відповідності		
		UA.TR.116			

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: 12.2024.